

RespiroX®

CE

**AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
KULLANIM KILAVUZU**

MODEL: RATS-01



**Kurulum ve Kullanım
Videosu için
For Installation and
Usage Video
Taratınız.
Scan it.**

İçindekiler

1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİLENDİRME	1
3. ÜRÜN GÜVENLİK SEMBOLLERİ	1
4. TEKNİK ÖZELLİKLER	2
5. GÜVENLİK	3
6. GÜVENLİK	3
7. KURULUM KILAVUZU	8
8. KULLANIM KILAVUZU	10
9. AKÜ	12
10. SORUN GİDERME	14
11. GARANTI	15
12. PAKET LİSTESİ	16

1. GİRİŞ

Konforlu seyahat imkanı sağlayan, günlük yaşamınızda erişilebilirliği artıran, zahmetsiz seyahat arkadaşınız Aküllü Tekerlekli Sandalyeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir. Tekerlekli Sandalyenizi ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzundaki tüm talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın. Kendi güvenliğiniz için, bu kullanım kılavuzunda verilen talimatları tamamen anlamanız çok önemlidir.

Şirketimiz, bu akülü tekerlekli sandalyenin yanlış kullanımı veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucu meydana gelebilecek herhangi bir maddi hasar veya bedensel yaralanmadan sorumlu değildir.

Bu kılavuzda yer alan uyarıları ve talimatları anlamakta sorun yaşarsanız, lütfen distribütörünüzle, sağlayıcınızla veya üreticiyle iletişime geçin.

2. Genel Bilgilendirme

Bu kılavuz ilk kullanımdan önce tamamen okunmalı ve anlaşılmalıdır.





Bu kullanım kılavuzundaki uyarıları, notları ve talimatları anlamakta zorluk çekiyorsanız veya ek yardıma ihtiyacınız varsa, profesyonel rehberlik ve yardım almak için lütfen yetkili sağlayıcınız veya distribütörünüzle iletişime geçin. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yanlış kullanım sonucunda güvenliğinizin riske girmesine ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.








Referans

Yetkili Tedarikçi: _____ Adres: _____
Telefon Numarası: _____ Satın Alma Tarihi: _____

3. Ürün Güvenlik Sembolleri

Aşağıdaki semboller uyarıları, zorunlu eylemleri ve yasaklanmış eylemleri tanımlamak için kullanılır. Seri Elektrikli Tekerlekli Sandalyeyi ilk kez kullanmadan önce bu sembolleri tam olarak anlamanız ve tamamen aşına olmanız çok önemlidir.

	Bu kılavuzda verilen talimatları okuyun ve izleyin.
	Güvenlik uyarı işareti veya sizin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atabilecek tehlikeli bir işlemin göstergesi.
	Çalışırken cep telefonu, telsiz, elektronik cihaz veya diğer radyo vericilerini kullanmayın.
	Parmak ezilme / sıkışma noktası.

	Temiz ve kuru bir ortamda; yağmur, kar, buz, tuz ve sudan uzakta saklayın.
	Aküde bulunan aşındırıcı madde
	Patlama tehlikesi
	Farklı amper-saat (Ah) kapasitelerine sahip aküler kullanmayın, Eski ve yeni aküleri karışık kullanmayın. Her zaman her iki aküyü de aynı anda değiştirin.
	Aletleri ve diğer metal nesnelere akü terminallerinden uzak tutun. Temas halinde kısa devre veya elektrik çarpması meydana gelebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	Yanıcı malzeme, açık alev veya kıvılcım gibi ısı kaynaklarına maruz bırakılmaktan kaçının. Aküleri yanıcı veya parlayıcı nesnelere birlikte taşımaktan kaçının.
	Atma ve geri dönüşüm

4. Teknik Özellikler

Genel	
Maksimum Tırmanma Açısı	9°(kullanıcı ağırlığına/güvenli tırmanma açısına bağlıdır)
Full Şarj Mesafesi	15km (kullanıcının ağırlığına, araziye, zemin durumuna, akü durumuna, sıcaklığa ve sürüş alışkanlığına göre değişir)
Maksimum Hız	6km/h
Dönüş yarı çapı	1050 mm

Motor	
Tür	DC Motor
Nominal Güç	300W
Giriş Gerilimi	DC24V
Adet	2 takım
Akü	
Nominal Kapasite	24V /12A
Nominal Güç	288

Denetleyici	
Kapasite	DC 24V/ 35A
Ön Tekerlek	
Boyut	10 inç veya 8 inç
Tür	Dolgu veya Havalı Lastik
Adet	2
Arka Tekerlek	
Boyut	16 inç veya 24 inç
Tür	Dolgu veya Havalı Lastik
Adet	2

5. Elektromanyetik Girişim Uyarısı

Elektrikli tekerlekli sandalye elektromanyetik parazitten (EMI) etkilenebilir, bu da sandalyenin çalışmasında hasara veya kesintiye neden olabilir. Parazit riskine karşı koruyucu önlemler almanıza yardımcı olabilecek talimatları anlamanız önemlidir.

Elektromanyetik dalgaların kaynakları yayın istasyonları, TV istasyonları, radyo vericileri, iki yönlü telsizler (telsizler gibi), cep telefonları ve bilgisayarlardır. Bu elektromanyetik dalgardan kaynaklanan parazitler sandalyenin frenleme ve kontrol sisteminde arızaya veya kalıcı hasara neden olabilir.

6. Güvenlik

⚠ Kullanım Güvenliği Kuralları

- Güvenli ve sağlam bir şekilde sabitlendiklerinden emin olmak için tüm elektrik ve kontrol bağlantılarını kontrol edin.
- Akü seviyelerini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde akünün şarj edildiğinden emin olun.
- Aletleri ve metal nesnelere akünün negatif ve pozitif kutuplarından uzak tutun. İki kutup yanlışlıkla temas ettiğinde kısa devre veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Akülü Tekerlekli Sandalyeleri ve özelliklerini tanıyın.
- Sandalyeyi bağımsız ve yetkin bir şekilde kullanacak kadar kendinize güvenene kadar ilk kullanımınız sırasında her zaman yardım isteyin.

Kontrol Paneli

Elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanırken güvenliğinizi sağlamak için, kontrol paneli güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Kontrol panelindeki herhangi bir düğme arızalanırsa veya yanıt vermiyorsa, sandalyeyi kullanmayı derhal bırakmalı ve onarım veya değiştirme için sağlayıcıyla iletişime geçmelisiniz.

Statik Pozisyon

Sandalye bir an için bile hareketsiz kaldığında; güç kapalı olmalıdır.

- Kontrol panelinin, sandalyenin istem dışı hareket etmesine neden olabilecek yanlışlıkla dokunmayla etkinleştirilmesini önleyin.
- Koltuğu, koltuğun çalışma sistemini aktive edebilecek ve koltuğa zarar verebilecek ve bedensel hasara yol açabilecek elektromanyetik parazit kaynaklarından koruyun.

Kontrol paneline sizden başka kimsenin dokunmasına izin vermeyin. Bu, sandalyenin farkında olmadan hareket ettirilmesini ve potansiyel ciddi bedensel zarara neden olmasını önleyecektir.

Hava Durumu Önlemleri



Bu akülü tekerlekli sandalye yağmur, kar, buzlu veya kaygan yüzeyli ortamlarda kullanılmamalı veya depolanmamalıdır. Bu koşullar sandalyenin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Sandalyenizi her zaman temiz ve kuru bir alanda tutun.

Cihaz yağmur, kar veya yüksek nemli ortamlarla temas ederse arıza meydana gelebilir. Koltuğu aşırı sıcak veya soğuk koşullara maruz bırakmayın. Sandalye tamamen su geçirmez değildir; nemli bir ortam sandalyenin içinde paslanma veya korozyona neden olabilir. Bu koşullardan herhangi birine yakalanırsanız, lütfen hemen güvenli bir alana gidin.

Arızayı önlemek için lütfen aşağıdaki yönergelere uyun:

- Koltuğu doğrudan suyla temas eden, aşırı sıcak veya soğuk veya yüksek nemli bir ortamda çalıştırmayın veya saklamayın.
- Sandalyeyi duş alırken, yüzerken vb. kullanmayın.
- Koltuğu tuzlu veya tatlı suda kullanmayın
- Koltuğu herhangi bir su kaynağının etrafında kullanmayın (örn. nehirler, göller, vb.)
- Koltuğu su ile yıkamayın.

Not: Sandalye ıslandığında, aküyü hemen dışarı çekin ve doğal olarak kurummasını bekleyin.

Sandalye tamamen kurduktan sonra aküyü geri takın.

Islak veya sürtünmesiz zeminlerde çalışırken, lütfen yavaş bir hızda dikkatlice hareket edin ve aşağıdaki güvenlik yönergelerini izleyin:

- Motor tekerleklerinden herhangi biri çekiş gücünü kaybettiğinde, sandalyenin kontrolünü kaybetmemek için sandalye derhal durdurulmalıdır (örn. kayma, devrilme, vb.).
- Kar, buz, su, yağ vb. ile kaplı eğimlere veya rampalara girmeyin.

Kontrol paneline sizden başka kimsenin dokunmasına izin vermeyin. Bu, sandalyenin farkında olmadan hareket ettirilmesini ve potansiyel ciddi bedensel zarara neden olmasını önleyecektir.

Yol Yüzeyleri

Tekerlekli Sandalye Serisi, beton ve iç mekan zemin döşemesi gibi kuru düz yüzeyler için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

Tekerleklerin, eksenin, motorun ve diğer parçaların hasar görmesini veya gevşemesini önlemek için Tekerlekli Sandalyeyi kum, düz olmayan veya gevşek yüzeyler, tali çim veya bozuk yol yüzeylerinde kullanmayın.

Sürüş sırasında Trafik Ve Çevre

kendi sorumluluğunuzdadır. Yerel trafik kurallarına dikkat edin. Halka açık yollarda araç kullanırken kendi güvenliğiniz için son derece dikkatli olun.

Araç Taşımacılığı



Araba, otobüs, tren, uçak veya gemi gibi herhangi bir ulaşım aracını kullanırken Tekerlekli Sandalye'ye oturmanın kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve tavsiye edilmediğini lütfen unutmayın.

Sandalyeden inmeden manuel olarak bir araca bindirilmeniz veya araçtan indirilmeniz gerekiyorsa, kimsenin sandalyeyi kolçaktan veya arka sırtlıktan kaldırmasına asla izin vermeyin. Sandalye, koltuk minderi çerçevesinin ön ve arka kenarlarından sıkıca kavranarak kaldırılmalıdır.

Ağırlık Dağılımı

Sürüş sırasında devrilmeyi önlemek için, akülü tekerlekli sandalyenin dengesi ve stabilitesi ihmal edilmemelidir. Aşağıdaki faktörler sandalyenin ağırlık dağılımını etkileyebilir:

- Sandalyenin yüksekliği ve açısı.
- Oturma pozisyonu veya kullanıcının vücudunun ağırlık yükleme pozisyonu.
- Rampa veya eğimin eğimi.
- Depolama sepetinde veya kullanıcı tarafından taşınan yük, sandalyenin ağırlık dağılımını olumsuz etkileyebilir.



Tekerlekli Sandalye konfigürasyonunu ve yapısını kendiniz değiştirmeyin veya ayarlamayın.

Açma/Kapama

- Koltuğa binmeden önce, gücün kapalı ve frenin "Kilit" konumunda olduğundan emin olun. Motor tekerleklerinde hareket olup olmadığını kontrol edin.
- Vücudunuzu sandalyenin içine ve dışına hareket ettirmenin en güvenli yolu hakkında sağlık uzmanlarınıza danışın.

- Koltuğa binerken ve inerken ayak dayama yerini her zaman yukarı katlayın.
- Koltuğa binerken/koltuktan inerken vücudunuzu hareket ettirmek için ayaklık üzerinde durmayın.
- Sandalyeye binerken/inerken ayaklarınızın ayaklık arasındaki boşluğa dolanmadığından veya sıkışmadığından emin olun.

Otururken Eğilmek veya Uzanmak

Ellerinizi uzatmak veya vücudunuzu sandalyeye yaslamak sandalyenin dengesini olumsuz etkileyebilir. Kendinizi doğru konumlandırmazsanız, sandalyeden düşebilir veya sandalyeyi devirebilirsiniz.

- Vücudunuzu bir taraftan kaldırmak veya koltuktan kalkmak gibi hareket ettirirken, vücudunuzu koltuk minderinin aralığından dışarı doğru eğmeyin.
- Koltuğunuzda ileri doğru hareket ederken vücudunuzu aşırı eğmeyin. Kalçanız her zaman koltuk minderine temas halinde olmalıdır.
- Dengenizi kaybederek düşmenize neden olabileceğinden, ellerinizi yapabileceğinizden daha uzağa uzatmayın.
- Hiçbir koşulda dizlerinizin arasındaki boşluktan veya vücudunuzun önünden bir şey almaya çalışmayın.
- Vücudunuzu uzattığınızda, sandalyenin devrilmesini önlemek için ayak desteğine kuvvet uygulamayın, bu ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Sandalyenin devrilmesini ve sırtlığın zarar görmesini önlemek için sırtlığın üst kısmına kuvvet uygulamayın.



Bu yönergelere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu eylemlerden herhangi birini yaparsanız, risk size aittir.



Koltuğa asla uzanmayın, eğilmeyin veya yaslanmayın. Bunu yapmak ağırlık merkezini ve sandalyenin ağırlık dağılımını değiştirir.

Yol Yüzeyleri

Rampalar, eğimler, bordürler, yükseltilmiş veya düz olmayan yüzeyler, çukurlar ve bozuk yollar gibi engellerin üzerinden geçmek tehlikeli olabilir. Sandalyenin devrilmesini önlemek için son derece dikkatli olunması gerekir.

Bir engeli yavaş, dikkatli ve dik bir şekilde tırmanmak veya inmek önemlidir. Bunu yapmamak sandalyenin hasar görmesine veya bedensel zarara yol açabilir.



Bu yönergelere uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu eylemlerden herhangi birini yaparsanız, risk size aittir.

Sabit bir engelin üzerinden geçmek için:

- Engele yavaş, dikkatli ve dik bir şekilde yaklaşın.
- Son derece dikkatli bir şekilde, ön tekerlekler engelle yeni temas ettiğinde ileri hızı yavaşça artırın ve arka tekerlekler engeli aştıktan sonra ileri hızı yavaşça azaltın.
- Yükselen eğimli bir engelin üzerinden geçerken vücudunuzun üst kısmını yavaşça ve hafifçe öne doğru eğin.
- Son derece dikkatli bir şekilde, ön tekerlekler engelle yeni temas ettiğinde ileri hızı yavaşça azaltın ve arka tekerlekler engeli aştıktan sonra ileri hızı yavaşça artırın.
- Alçalan eğimli bir engelin üzerinden geçerken vücudunuzun üst kısmını hafifçe arkalığa yaslayın.
- Ani duruş ve kalkışlardan kaçın.
- Her zaman engele doğru dik olarak ilerleyin.

Eğimli Yollar

Eğimli bir yolda araç kullanırken kendinizi rahatsız hissediyorsanız, kendinize zarar vermektan korunmak için yardım isteyin.

- 9°'nin üzerindeki eğimlerde araç kullanılması tavsiye edilmez
- 12°'nin üzerindeki eğimlerde araç kullanılmamalıdır.
- Islak kaygan eğimlerde (örn. kar, buz, su, yağ) araç kullanılmamalıdır.
- Eğimin dibinde çukurlar varsa eğimde araç kullanılmamalıdır.
- Sürekli yukarı ve aşağı eğimli alanlarda sürüş yapılmamalıdır.

Tersine Sürüş



Geriye doğru sürerken lütfen çok dikkatli olun. Motor tekerlekleri engelleyici bir nesneye çarpabilir, bu da sandalyenizin kontrolden çıkmasına ve devrilmesine neden olabilir.

- Geri geri giderken tüm engelleyici nesnelere temizlenmeli ve dikkatli ve yavaş bir şekilde yaklaşılmalıdır.
- Eğimli yokuşlarda geri viteste sürmeyiniz.

Yük Limiti

- Sandalyenin Maksimum Yüğü: 120kg aşmayın.
- Kullanıcı hiçbir koşulda sandalyeyi kullanırken ağırlık çalışması yapmamalıdır.
- Sandalyenin aşırı yüklenmesi sandalyenin iskeletine, sabitlenmiş parçalarına ve katlama cihazına zarar verebilir.
- Aşırı yüklemenin neden olduğu hasarlar sandalyenin garantisini geçersiz kılar.

Merdivenlerden ve Yürüyen Merdivenlerden İnme/Çıkma

Tekerlekli sandalye uzun yolculuklar veya merdivenlerden ve yürüyen merdivenlerden inip çıkmak için tasarlanmamıştır.



Tekerlekli sandalyenin merdivenlerde ve yürüyen merdivenlerde hareket ettirilmesi veya kullanılması yasaktır. Ciddi bedensel yaralanmalara neden olabilir.

7. Kurulum Kılavuzu

Kontrol Panelinin Montajı

Kontrol paneli sağ veya sol kol dayanağına monte edilebilir.

1. P1, P2'de gösterildiği gibi, kontrol paneli kablosunu yuvarlak borudan (P1) geçirin ve vidayı sıkıca açın (P2)



P1



P2

Sandalyenin açılması

Herhangi bir ayarlama, onarım veya bakımdan sonra, tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.



Sandalyeyi kaldırırken, sandalyeyi kaldırmadan veya tutmadan önce kullanıcının sandalyeden indirilmesi tavsiye edilir. Sandalyeyi ve kendinizi birlikte tutmanız kesinlikle gereklirse, lütfen çok dikkatli olun ve sandalyeyi kaldırmaya yardımcı olacak en az iki görevli bulundurun. Koltuk tabanının ve çerçevesinin ön ve arka kenarları tutulmalıdır.

Açma



P3

1. P3'te gösterildiği gibi, koltuğun her iki tarafındaki koltuğu aynı anda aşağı doğru itin.



P4

2. Koltuk düz olana kadar akü tutma yerini aşağı doğru itin.



P5

3. İki kol dayama yerini P5'te gösterildiği gibi döndürün



P6

4. P6'da gösterildiği gibi, bir klik sesi duyulana kadar arka dayanağı şekilde gösterilen yönde yukarı çekin.

Akünün Takılması

Aküyü bağlantı bağlantısına (P7) yerleştirin, ardından kırmızı fişleri akü ve kontrolör (P8, P9) arasına bağlayın.



P7

P8

P9

8.Kullanım Kılavuzu

Kontrol Kumandası

tekerlekli sandalyeyi ilk kez kullanırken, düşük hızda yavaşça ve kumanda kolunu kademeli olarak ileri iterek hareket ettirmeniz önerilir. Alıştırma çalışması, sandalyenin hızını ve başlatılıp durdurulmasını kontrol etmeye alışmanıza yardımcı olacaktır Yüksek hızlarda keskin dönüşler yapmayın. Sandalye dengesini kaybedip devrilerek ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

Kontrol panelindeki kumanda kolu, rahat ve zahmetsiz bir şekilde 360 derece her yöne manevra kabiliyeti sağlar. Kumanda kolunun içinde, bırakıldığında otomatik olarak orijinal konumuna dönen bir yay bulunur.


Kumanda kolunu hedef yöne doğru itin. Kumanda kolu, sürüşü orantılı olarak kontrol edebilir, ne kadar sert itilirse o kadar hızlı gider. Maksimum sürüş hızı saatte 6 km'dir. Koltuğun güvenli bir şekilde yavaşlaması için kumanda kolunu yavaşça ve kademeli olarak bırakın. Kumanda kolunun aniden bırakılması sandalyenin dengesini kaybetmesine ve devrilerek yaralanmasına neden olabilir.

Kontrol Paneli aşağıdakilerden oluşmaktadır:



Numara:	İşlev:	Açıklama :
1	Açma/Kapama Tuşu	Bu butona basıldığında sandalye açılır/kapanır.
2	Hız Butonu	Sandalyenin hızını artırın Maks. hız: 6 km/saat (3,75 m/saat).
3	Hız Butonu	Sandalyenin hızını azaltın.
4	Korna	Sesi duymak için kornaya basın.
5	Batarya Ömrü Göstergesi	Pil seviyesini gösterir.
6	Kontrol Joystick	Sandalyenin yönünü ve hızını kontrol edin. Kumanda kolunu istediğiniz yöne doğru itin.
7	Hız göstergesi	5 LED ışık yandığında, sandalye maksimum hızdadır. 1 LED ışık yanıyorsa, sandalye en düşük hızdadır.

İşlev:	Kumanda kolunun çalışması:
İleri	Kontrol kolunu ileri itin.
Geri	Kontrol kolunu geri itin
Sağ	Kontrol kolunu sağa itin
Sol	Kontrol kolunu sola itin
Fren	Kontrol kolunu kademeli olarak bırakın (sandalye güvenli bir şekilde durmak için yavaşlayacaktır)

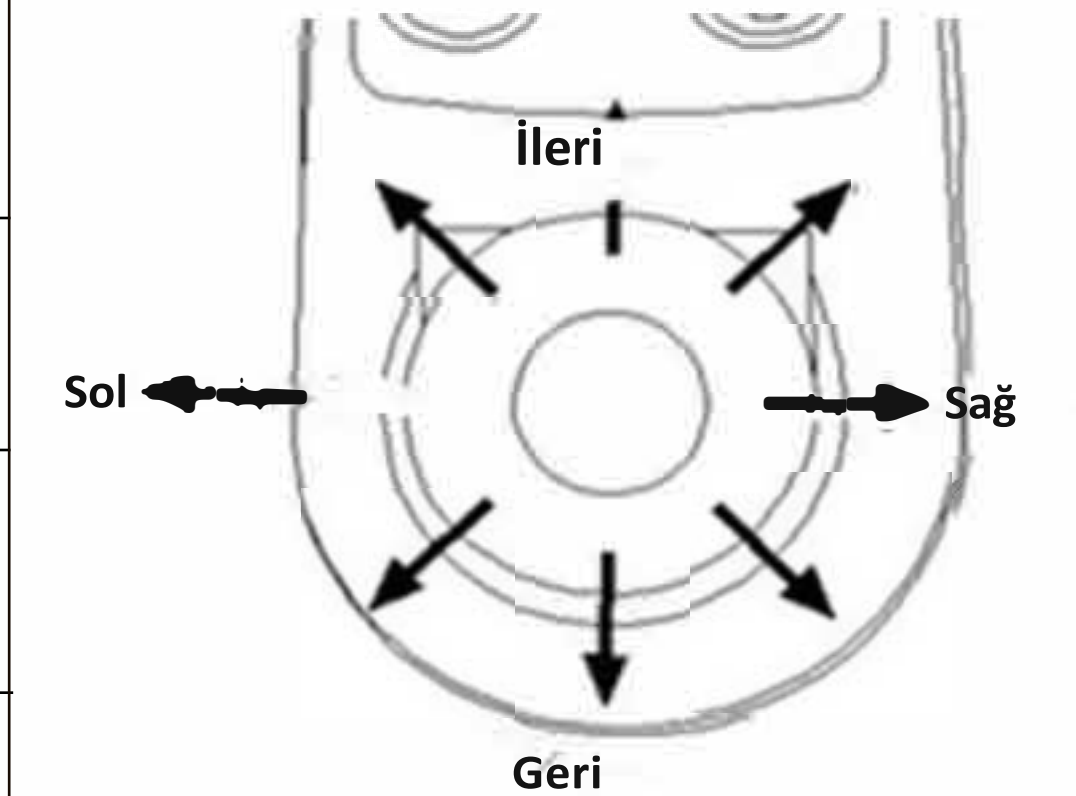






Manuel ve elektrikli modlar

Kontrol ünitesini açın. Kontrol ünitesi ışığı açıldıktan sonra elektrik moduna girecektir. Kontrol ünitesini kapatın ve manuel moda girin



9. Akü

	Farklı amper-saat (Ah) kapasitelerine sahip aküleri kullanmayın. Eski ve yeni aküleri karışık kullanmayın. Her zaman her iki aküyü de aynı anda değiştirin.
	Aletleri ve diğer metal nesnelere akü terminallerinden uzak tutun. Temas halinde kısa devre veya elektrik çarpması meydana gelebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	Yanıcı maddelerden kaçınin. Açık alev veya kıvılcım gibi ısı kaynaklarına maruz bırakılmaktan kaçınin. Aküleri yanıcı veya parlayıcı nesnelere birlikte taşımayın.
	Aküde aşındırıcı madde bulunmaktadır. Aküyü parçalarına ayırmayın.
	Patlama tehlikesi. Aküleri şarj ederken, sandalyeyi ve akü şarj cihazını iyi havalandırılan bir alana, alev ve kıvılcımlardan uzağa yerleştirin.

Kontrol Kumandası

- Aküyü şarj etmek için pense veya metal kablolar kullanarak akü terminalini doğrudan bağlamaya çalışmayın.
- Akü şarj edilirken sandalyeyi kullanmayın. Akü şarj edilirken sandalyenin çalışmasını engelleyen bir elektronik sürücü kilitleme cihazı etkinleştirilecektir.
- Standart olmayan güç kaynağı (örn. jeneratör veya invertör) kullanmayın.

- Güç kablosunu sıkmayın, bükmeyin, sarsmayın veya bağlamayın.
- Akünün etrafında sigara içmeyin veya herhangi bir şeyi tutuşturmayın.
- Güç kablosunu çekerken, çıkarmak için fişi tutun.
- Güç kablosunu çocuklardan veya evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Devre kesiciyle ilgili herhangi bir sorun varsa, şarj cihazını derhal çıkarın ve sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Akünün çalışma sıcaklığı -5 °C ila 40 °C arasındadır.

Akü Bakımı

Pilin ömrü ve performansı sıcaklıktan, pilin durumundan ve kullanıcının ağırlığından etkilenebilir. Aküyü ilk kullanımdan önce uzun süre süreli olarak şarj etmek, akünün kullanım ömrünü azaltabilir. Aküyü ilk kez şarj etmek için, kontrol panelindeki LED ışığının en düşük seviyesi yanıp söndüğünde şarj etmeniz önerilir.

Yeni bir aküyü ilk kez şarj ederken, akünün tam olarak etkinleşmesi için tam olarak şarj edilmiş olması gerekir.

Kullanmadan önce daima pilin tam olarak şarj edilip edilmediğini kontrol edin.

Normal şarj süresi yaklaşık 5 saattir. Güç tamamen tükenirse, şarj cihazındaki LED'i yeşile dönene kadar tamamen şarj olması 10-12 saat sürebilir. Bu nedenle akü için önerilen şarj süresi 8-12 saattir.

Koltuğu uzun süre kullanmadığınızda, aküyü her 2 ayda bir tam olarak şarj edin. Akü uzun süre şarj edilmeden bırakılırsa, kalıcı olarak zarar verir.

Akü normal AC gücü ile şarj edilebilir (AC 110-220 V, 50-60 Hz). Şarj portu, kontrol panelinin ön kısmının altında yer almaktadır. Şarj etmeden önce sandalyenin kapalı olduğundan emin olun.

1. Şarj cihazının 3 pinli kablosunu kontrol panelinin ön kısmının altındaki şarj portuna takın
2. Yerleşik olmayan şarj cihazını bir elektrik prizine takın. LED yandığında şarj oluyor demektir.
3. Şarj cihazındaki LED yeşile döndüğünde, pilin tamamen şarj olması için 30 dakika daha şarj etmeye devam edin.
4. Kontrol panelinin şarj portundan çıkarmadan önce şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın.



5.Lütfen pili uygun bir sıcaklıkta şarj edin. Şarj için önerilen ortam sıcaklığı 5° C ila -40° C arasındadır.

⚠ DİKKAT

Akünün içindeki asidik maddenin cildinize, giysilerinize veya diğer eşyalara temas etmesine izin vermeyin. Bu madde son derece tehlikelidir ve ciddi yanıklara neden olabilir. Temas ettiğinde, cildinizi derhal soğuk suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

10.Sorun Giderme

Kontrol paneli, LED ışığı vasıtasıyla bir dizi olası sorun durumunu gösterecektir. LED ışığı yeşil yandığında koltuk sorunsuzdur. Bir sorun oluştuğunda, LED ışığı yanıp sönecektir.

Bir "Sorun" LED ışığı yanıp söndüğünde, koltuğun gücünü kapatın ve tekrar açın. Yanıp sönen "Sorun" LED ışığı değişmeden kalırsa, olası nedenler ve çözümler için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun durumunun nedenini belirleyemiyorsanız, lütfen yardım için sağlayıcınıza veya distribütörünüze başvurun.

Sorun Giderme Tablosu

No	Sorun	Olası nedenler	Çözümler
1	Güç göstergesi (en düşük FFF seviyesi LED ışığı yanıp söner	Akünün kırmızı fişini kontrolör konektörüne yeniden takın, bkz.	Akünün kırmızı fişini kontrolör konektörüne yeniden takın "akünün takılması" talimatlarına bakın
		Düşük güç kaynağı, güç otomatik olarak kesilir.	Güç otomatik olarak kapanırsa, piller 2 gün içinde yeniden şarj edilmelidir.
2	Hız göstergesi LED ışığı yanıp söner	En düşük seviye LED ışığı yanıp söner: sol motor bağlı değil.	Sol motorun kırmızı fişini kontrolörün kırmızı fişine yeniden bağlayın.
		İkinci seviye LED ışığı: sağ motor bağlı değil.	Sağ motorun kırmızı fişini kontrol ünitesinin kırmızı fişine yeniden bağlayın.
		Üçüncü seviye LED ışığı yanıp söner: kumanda kolunda arıza	Sandalyeyi kullanmayın, sağlayıcı için yardım isteyin
		Dördüncü seviye LED ışığı: MOS arızası yanıp söner: motor bağlantısı başarısız.	Sandalyeyi kullanmayın, sağlayıcı için yardım isteyin

3	Motor Tekerleği	Motor çalışırken gürültü ve titreşim oluşur.	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
4	Şarj başına düşen mesafe azaldı	İnişli çıkışlı yollarda veya yokuşlarda sürüş.	bu tür yerler daha fazla pil gücü tüketeceğinden normaldir.
		Akü kullanımı hizmet ömrünü aşmıştır.	Pili değiştirmek için müşteri hizmetlerine başvurun.
5	Şarj etmek	Kontrol Panelinde hasar.	Kontrol lambalarını değiştirmek için müşteri hizmetlerine başvurun.
		Şarj cihazı fişi hasarlı.	Şarj cihazını değiştirmek için müşteri hizmetlerine başvurun.
		Şarj soketi gevşemiş.	Sıkıca yeniden bağlayın.
6	Güç açıldığında çalışmıyor	Bir süre kullanmadıktan veya şarj ettikten sonra.	Yeniden etkinleştirmek için gücü açın ve kapatın.

11.Garanti Kapsamı

Garanti dahil ürünler	Geçen Süre (Satın almadan itibaren)	Açıklama
Ana Çerçeve	2 sene	Yanlış kullanım, kullanıcı tarafından verilen hasar veya sandalyede yapılan değişiklikler garantiyi geçersiz kılacak ve onarım masrafları tahsil edilecektir.
Motor	1sene	Aşırı yüklenme veya kullanıcı tarafından kurcalanma nedeniyle hasar görmesi garantiyi geçersiz kılar.
Akü	Lityum batarya için 6 ay	Kullanıcı tarafından yanlış şarj veya kurcalama nedeniyle hasar görmesi garantiyi geçersiz kılacaktır. Sonrasında meydana gelen kazalardan sorumlu değiliz.
Kontrol Cihazı	1 sene	Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar, kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler garantiyi geçersiz kılacaktır. Onarım masrafları tahsil edilecektir.

Garanti süresi içinde servis için fatura ve garanti kartı gereklidir, aksi takdirde onarım masrafları tahsil edilecektir.

1. Garanti istisnaları aşağıdaki öğeleri kapsar:

- Döşeme ve oturma yeri, kolçak, bacak koruması, ayak dayama yeri, fren balataları, motor fırçaları, lastikler normal aşınma ve yıpranma nedeniyle değiştirilmelidir.
- ihmal, kaza, yanlış kullanım, suistimal, aşırı yük ticari kullanım, yanlış çalıştırma, bakım veya depolama nedeniyle hasar gören bileşenler.

2. Koltuğun üzerindeki seri numarası orijinal değilse veya değiştirilmişse veya garanti

kartındakiyle tutarsızsa veya garanti kartındaki seri numarası değiştirilmişse, garanti geçersiz olacaktır.

3. Garanti devredilemez ve sadece koltuğun ilk alıcısı içindir.

Yasal Uyarı

Tekerlekli sandalyemizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu sandalyenin uygunsuz veya güvensiz kullanımı sonucu oluşabilecek herhangi bir kişisel yaralanma veya maddi hasar için tüm sorumluluk kabul edilmez

Eğer Tekerlekli Sandalye ve güvenli kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yetkili sağlayıcınız ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

12. Paketleme Listesi

İsim	Adet	Açıklama
Tekerlekli sandalye ana çerçevesi	1	/
Akü	1	/
Joystick kontrol paneli	1	/
Şarj aleti	1	/
Kullanım Kılavuzu	1	/
Eğitim videosu	1	/
Bir koltuk ve sırtlık seti	1	/
Bir çift ayak desteği	1	/



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. AŞ.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1

Avcılar/İstanbul/Türkiye 444 78 96

www.ecemedikal.net/www.respirox.com.tr

Yayın Tarihi: 20.04.2023