

**ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ SANDALYE
HASTA TRANSFER ARACI
MODEL:RTS-02**



KULLANIM KILAVUZU

**ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ SANDALYE HASTA
TRANSFER ARACI**

RTS-02 transfer tekerlekli sandalyesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce yeni transfer tekerlekli sandalyenizi anlamak için bu talimatları dikkatlice okuyun. RTS-02 transfer tekerlekli sandalye; denge eksikliği yaşayan, hareket aralığı sınırlı olan veya ameliyat sonrası yürürken desteğe ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ağırlık kapasitesi 100 kg'dır.

Ürün fonksiyonu

Tekerlekli sandalye, hem güvenli hem de rahat olması hedeflenerek tasarlanmıştır ve ana özellikleri şunlardır:

1. Tek düğme ile katlama ve açma, pürüzsüz yapı, güvenli ve hafif.
2. Çerçeve, yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum profillerle kaynaklanmıştır.
3. Ayak desteği yukarı kaldırılabilir.
4. Katlanabilir çerçeve.


Kurulum ve Kullanım
Videosu İçin
For Installation and
Usage Video
Taratiniz.
Scan it.



Tekerlekli Sandalye Katlama İşlemi:



Fren Fonksiyonunun Çalışması:



Koltuk yastığını çıkarma ve takma: Koltuk yastığını temizlemeniz gerekiyorsa, çıkarmak için yastığın üzerindeki düğmeye basın.

Tekerlekli Sandalye Açma İşlemi:



Her iki tarafa itme ve çekme



Güvenlik tokası sabitlendi



Lütfen Dikkat!

1. Lütfen nemli alanlarda kullanmayın!
2. Rolatörü uzun süre güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının, bu plastik parçaların kurumasını ve olası çatlamları önleyecektir.
3. Hizmet sürelerini uzatmak istiyorsanız lütfen nemli ortamda veya sürekli olarak dış mekanda kullanmayın.
4. Tekerlekli sandalyeyi yürüyen merdivenlerde veya merdivenlerde kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Ürün temizliği: Yüzeyi yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1

Avcılar/İstanbul 444 78 96

www.ecemedikal.net/ www.respirox.com.tr

Yayın Tarihi:26.05.2023